


Falf Llif Uchel Silindr

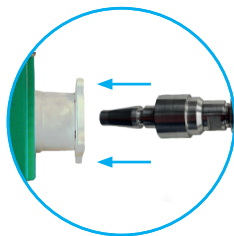

Cysylltwch y falf llif â'r silindr. Gwthiwch y falf nes i chi glywed clic.



Cysylltwch y falf â'r pigynnau trwynol neu'r masg.




Trowch y silindr ymlaen.



Sicrhewch fod y falf wedi'i gosod ar y gyfradd llif gywir.



Ar ôl gorffen, gosodwch y llif ar y falf i O.

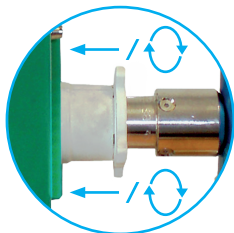

Er mwyn tynnu'r falf, gwthiwch y gorchudd gwyn tuag at y silindr, neu ei droi yn glocwedd (yn dibynnu ar y silindr).

Am ba hyd mae silindrau B10 yn para wrth ddefnyddio falf llif uchel

Litrau Fesul Munud

Hyd

5	7 awr 4 munud
10	3 awr 32 munud
12	2 awr 56 munud

