

Canllaw ar Hunan-lenwi



Cynnwys

Dod i Adnabod Rhannau o'ch Dyfais Hunan-lenwi **3**

Am ba Hyd y Mae'r Silindr Llawn yn Para **4**

Sut i Ddefnyddio eich Dyfais Hunan-lenwi **5**

Cynnal a Chadw a Glanhau **9**


Datrys Problemau **10**



**ENHANCING
LIVES**

Dod i Adnabod Rhannau o'ch Dyfais Hunan-lenwi

- A** Silindr
- B** Uned lenwi ocsigen
- C** Y twll llenwi
- D** Gorchudd llwch
- E** Stand
- F** Peiriant ocsigen
- G** Allfa ocsigen
- H** Mesurydd llif/nodyn addasu
- I** Goleuadau'r dangosydd
- J** Switsh On/Off
- K** Mesurydd awr

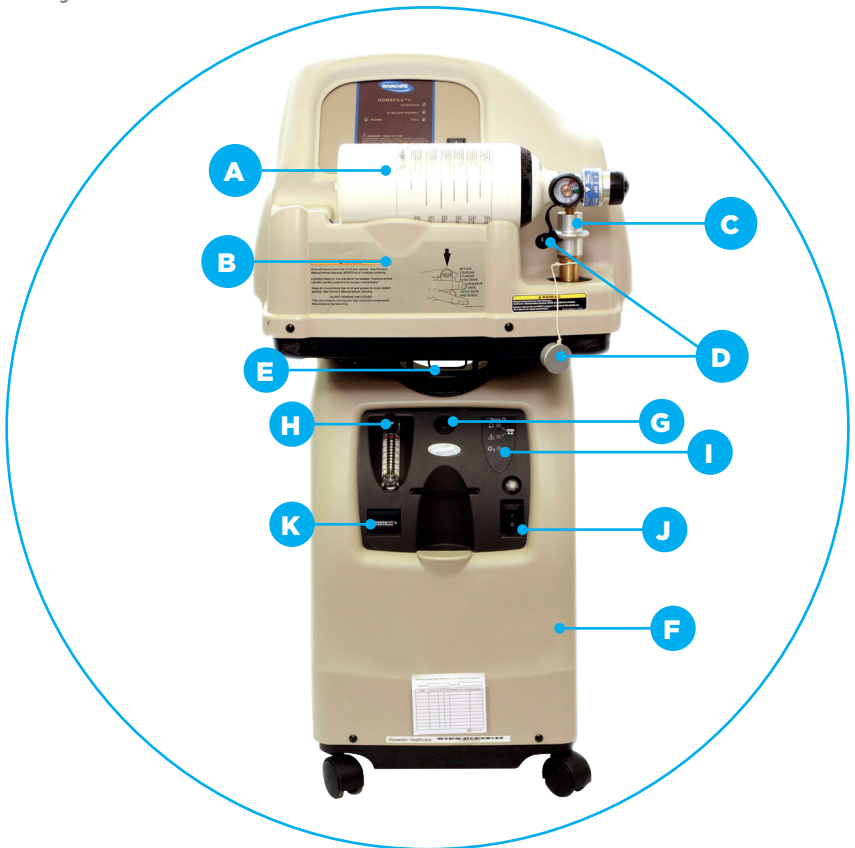

(ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer galwadau brys)

Am ba Hyd y mae'r Silindr Llawn yn Para

Am ba hyd y mae silindrau hunan-lenwi yn para

Gosodiad	HF2PCR6	HF2PCE9
1	9 awr 18 munud	14 awr 18 munud
2	5 awr 54 munud	9 awr 6 munud
3	4 awr 30 munud	6 awr 54 munud
4	3 awr 36 munud	5 awr 36 munud
5	3 awr	4 awr 42 munud
Parhaus (2 lpm)	1 awr 20 munud	2 awr 5 munud

Sylwch: Mae eich silindr a'ch dyfais hunan-lenwi yn eiddo i Baywater Healthcare, ac ar fenthyg i'r GIG.

Rhybudd

Sicrhewch fod y peiriant ocsigen yn cael ei gadw'n syth bob amser.

Cysylltwch eich peiriant ocsigen â'r prif gyflenwad trydan - peidiwch â defnyddio cebl estyniad

Yn unol â'r cyfarwyddyd a gawsoch gan eich Gweithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol, gwnewch yn siŵr fod y gyfradd llif ar eich peiriant ocsigen wedi'i gosod i'r gosodiad cywir.

Peidiwch â chyfyngu'r llif aer o amgylch y peiriant ocsigen.

Sut i Ddefnyddio Eich Dyfais Hunan-lenwi

Sut i ddefnyddio'r peiriant ocsigen heb yr uned lenwi

- Gwnewch yn siŵr bod eich uned lenwi wedi'i diffodd ac nad oes silindrau wedi'u cysylltu â hi.
- Plygiwch y peiriant ocsigen i mewn i soced – peidiwch â defnyddio cebl estyniad.
- Pwyswch y switsh “power” - byddwch chi'n clywed sŵn larwm, a bydd goleuadau'r panel yn goleuo.
- Ar ôl eiliad, bydd y goleuadau'n diffodd gan adael dim ond y golau O2 gwyrdd ymlaen.
- Gwnewch yn siŵr bod y bêl yn y mesurydd llif yng nghanol y llif a gafodd ei roi ar bresgripsiwn. Os nad yw'r bêl yng nghanol eich cyfradd llif a gafodd ei rhoi ar bresgripsiwn, defnyddiwch y nobyn i addasu'r llif nes ei bod yn cyfateb i'r llif cywir.
- Diffoddwch y ddyfais pan nad ydych chi'n ei defnyddio.

Rhybudd

Dim ond y gyfradd llif a gafodd ei rhoi ar bresgripsiwn gan eich Gweithiwr Gofal Proffesiynol y dylech chi ei defnyddio.

Peidiwch byth â gadael silindrau yn sownd i'r uned lenwi ocsigen pan nad ydynt yn cael eu llenwi. Cyfeiriwch at yr adran silindrau ar sut i storio eich silindr hunan-lenwi.



Sut i llenwi'r silindr hunan-lenwi

1. Cyn llenwi

- Trowch y peiriant ocsigen ymlaen am o leiaf 30 munud cyn ceisio ail-lenwi silindrau.
- Gwiriwch y gwasgedd ar y silindr. Os yw'r gwasgedd yn is na chwarter llawn, mae eich silindr yn barod i gael ei ail-lenwi.
- Tynnwch y pigynnau trwynol o'r silindr.
- Diffoddwch y deial llif glas ar y silindr i ffwrdd.
- Tynnwch y caeadau llwch du os oes modd gwneud hynny - pinsiwch a thynnwch ar y caead.





2. Cysylltwch y silindr â'r uned lenwi

- Ar yr uned lenwi ocsigen, pwyswch ar gylch allanol y twll llenwi nes bod dotiau gwyrdd yn ymddangos.
- Gafaelwch yn y silindr wrth y gwddf (y tu ôl i'r mesurydd cynnwys).
- Rhowch y silindr yng nghrud yr uned lenwi ocsigen.
- Gosodwch dwll llenwi'r silindr gyda thwll llenwi'r uned lenwi ocsigen.
- Gwthiwch i fyny ar gylch allanol y twll llenwi ar yr uned lenwi ocsigen, a gwthio'r silindr i lawr.

Pan mae'r nodwydd ar ddeial y silindr yn y parth coch, mae angen llenwi'r silindr. Os yw'r silindr eisoes yn chwarter llawn, mae'n bosibl na fydd y silindr yn llenwi pan fydd wedi'i atodi.

3. Trowch yr uned lenwi ymlaen

Trowch yr uned lenwi ocsigen ymlaen. Dylai'r canlynol ddigwydd:

- 0-3 munud: bydd y golau 'O2 below normal' yn goleuo wrth i'r uned lenwi gynhesu.
- Ar ôl tri munud: bydd y golau 'filling' yn goleuo tra bydd y silindr wrthi'n llenwi.
- Pan fydd y silindr yn llawn: bydd y golau llenwi yn diffodd, a bydd y golau 'full' yn troi ymlaen.
- Mae'n cymryd tua dwy awr i lenwi silindr gwag.

Os bydd nam yn ystod y broses lenwi, bydd y golau 'attention' yn goleuo.

4. Tynnu'r silindr

- Unwaith y bydd y silindr yn llawn, diffoddwch yr uned lenwi.
- Gydag un llaw, gafaewch yn y silindr drwy roi eich llaw y tu ôl i'r deial cynnwys.
- Gyda'r llaw arall, daliwch gylch allanol y cysylltydd ar gyfer y twll llenwi, a'i bwyso i lawr.
- Codwch y silindr er mwyn tynnu'r cysylltydd.
- Gollyngwch gylch allanol y twll llenwi ar yr uned lenwi ocsigen, a defnyddiwch ddwy law i dynnu'r silindr o'r crud.
- Rhowch y caeadau llwch du ar dwll llenwi'r uned lenwi ac ar dwll llenwi'r silindr.

Rhybudd

Peidiwch byth â thynnu'r silindr o'r uned lenwi ocsigen pan fydd wedi'i droi ymlaen.



Cynnal a Chadw a Glanhau

Unwaith y dydd:

- Glanhewch yr uned lenwi gyda chadach sych a glân.
- Edrychwch ar y silindr am ddifrod, a gwnewch yn siŵr bod y caead llwch du yn cael ei newid pan nad yw'n cael ei ddefnyddio.
- Golchwch yr holl hidlyddion ewyn naill ai gyda dŵr cynnes a sebon, neu defnyddiwch hwfer i gael gwared ar unrhyw lwch. Mae dau hidlydd, un yn yr uned lenwi ac un yn y peiriant ocsigen.

Rhybudd

Golchwch yr hidlyddion yn drylwyr a gwnewch yn siŵr eu bod yn sych cyn eu newid.

Peidiwch â defnyddio eich peiriant ocsigen heb hidlyddion.

Peidiwch â storio silindrau hunan-lenwi o dan y rhewbwynt

(ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer galwadau brys)



Datrys problemau

1. Os bydd y larwm yn seinio ar ôl i'r peiriant gael ei droi ymlaen, neu os nad yw'r larwm yn stopio seinio ar ôl ychydig eiliadau, gwnewch yn siŵr bod y soced trydan ar y wal wedi'i droi ymlaen. Os yw'r soced wedi'i droi ymlaen, diffoddwch y peiriant ocsigen a'i droi ymlaen eto. Os bydd y larwm yn dal i seinio, gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw beth yn yr hidlydd wedi blocio nac yn llychlyd. Edrychwch ar y peiriant yr holl ffordd o'r peiriant ocsigen hyd at y pigynnau trwynol neu'r masg i wneud yn siŵr nad oes unrhyw beth yn y tiwbiau wedi blocio. Os nad yw'r gwiriadau hyn yn helpu, ffoniwch ni i gael rhagor o arweiniad.
2. Os nad oes modd teimlo ocsigen yn dod o'r pigynnau trwynol neu'r masg, gwiriwch y tiwb llif i wneud yn siŵr bod y gosodiad yn gywir, a gwneud yn siŵr bod y deial yn gywir. Cofiwch na ddylid defnyddio masg gyda'r silindrau cludadwy. Os yw'r gosodiad llif ar y tiwb llif ar sero, ac os nad oes modd i chi ei droi i fyny, ffoniwch ni i gael rhagor o arweiniad.



- 3.** I brofi'r llif o'r peiriant ocsigen, gallwch chi roi'r tiwbiau ocsigen mewn gwydraid o ddŵr i weld a oes swigod yn ymddangos. Os bydd swigod, mae hyn yn golygu bod ocsigen yn cael ei gynhyrchu. Os nad oes swigod yn ymddangos, edrychwch ar y tiwbiau ocsigen am arwyddion o dyllau neu rwyg. Os nad ydych chi'n gallu datrys y broblem, ffoiwch ni ar 0800 373580 i gael rhagor o arweiniad.
- 4.** Os nad oes modd teimlo llif yn dod o'r silindr ocsigen. Gwnewch yn siŵr nad oes tyllau na phlygiadau yn y tiwb, a'i fod wedi'i gysylltu â'r silindr yn gywir. Gwiriwch y mesurydd cynnwys i sicrhau nad yw'r silindr yn wag. Os na fydd yr un o'r camau hyn yn datrys y broblem, ffoiwch **0800 373580** i gael cyngor.







I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Baywater Healthcare

Wulvern House
Electra Way
Crewe
Cheshire
CW1 6GW

Ffoniwch: 0800 373580

-  healthuk@baywater.co.uk
-  @BaywaterHealth
-  Baywater Healthcare
-  Baywater Healthcare



**ENHANCING
LIVES**